

TRANSFUZAMM



Qual o sangue mais seguro que o paciente pode receber?

... o próprio!

 zammi

Indicações

O auto-hemotransfusor é de fácil manuseio. Podendo ser utilizado em situações de procedimentos cirúrgicos eletivos ou de urgência/emergência, desde que o sangue não esteja misturado a outras secreções corpóreas. Possui como principal indicação o uso de sangue autólogo, o que permite uma hemotransfusão imediata, evitando assim a dependência de sangue biocompatível, à demora na intervenção do paciente em choque e todas as reações transfusionais que por ventura possam acontecer.

Sendo indicado para procedimentos cirúrgicos como cirurgias vasculares, neurológicas, torácicas, cardíacas entre outras.

Atenção

- A pressão negativa do aspirador (vácuo) deve ser mantida tão baixa quanto possível a fim reduzir os riscos de hemólise. O vácuo não deve exceder 100/150mmHg (4/6polHg);
- A ponteira de aspiração deve estar posicionada o mais próximo possível da fonte de sangramento;
- O sangue que será autotransfundido não pode ser armazenado e deve ser reinfundido dentro de quatro horas após a captação;
- O volume de sangue a ser autotransfundido não deve exceder 3500ml;
- Não misturar sangue de autotransfusão com sangue homólogo.

Custo benefício

- Dispositivo único e completo;
- Fácil e rápida instalação;
- Reaproveitamento total do sangue coletado;
- Redução dos riscos pós transfusionais;
- Atóxico e descartável;
- Esterilizado em ETO.

TRANSFUZAMM



Sistema de autotransfusão composto por:

1. Circuito de infusão com bureta e câmara gotejadora de microgotas;
2. Pinça rolete;
3. Ponteira de aspiração cirúrgica;
4. Extensão da ponteira de aspiração;
5. Filtro de 60 micras;
6. Reservatório de sangue;
7. Circuito de infusão com câmara gotejadora gotas;
8. Pinça rolete;
9. Extensão para conexão à rede de vácuo;
10. Filtro de proteção de rede;
11. Garra de fixação sustentação do reservatório de sangue;
12. Flash Ball em Látex cicatrizante com conector 1/8.