

INSTRUÇÃO DE USO

COLETOR DE SECREÇÕES E EXPURGO - MULTIZAMM

NOME COMERCIAL: MULTIZAMM

1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para coleta de material aspirado que não deve ser reaproveitado durante o ato cirúrgico. O produto dispõe de uma válvula de segurança que permite a regulagem da pressão de aspiração.

Os modelos AR dispõem de uma válvula anti-refluxo (AR) que permite o bloqueio da aspiração quando o nível está no limite.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O produto é composto por:


Multizamm AR – Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-refluxo; 01 válvula de segurança; 2 vias (uma para a extensão vácuo e outra para a extensão paciente); 2 ou 03 extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 ou 5,00 m com diâmetro de 1/4" ou 3/16" com terminação para conexão às linhas vácuo e/ou paciente e clamp regulável em cada uma das vias.

Multizamm SAE - Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml ; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-refluxo; 01 válvula de segurança; 2 vias (uma para a extensão vácuo e outra para a extensão paciente); 2 ou 03 extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 ou 5,00 m com diâmetro de 1/4" ou 3/16" com terminação para conexão às linhas de vácuo e/ou paciente com clamp regulável em cada uma das vias e 01 aspirador cirúrgico.



Multizamm – Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula de segurança; 2 vias (uma para a extensão vácuo e outra para a extensão paciente); 2 ou 03 extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 ou 5,00 m com diâmetro de 1/4" ou 3/16" com terminação para conexão às linhas vácuo e/ou paciente e clamp regulável em cada uma das vias.

Multizamm AR Frasco - Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-refluxo e 01 válvula de segurança;


Multizamm Frasco - Composto por 01 frasco coletor rígido na capacidade de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca e 01 válvula de segurança; A descrição de cada modelo, apresentando a diferença entre os mesmos e a especificação do número, comprimento e diâmetro das extensões, bem como a capacidade dos frascos a ser comercializada é apresentada na tabela 1 – (Diferenças técnico-específicas dos modelos)

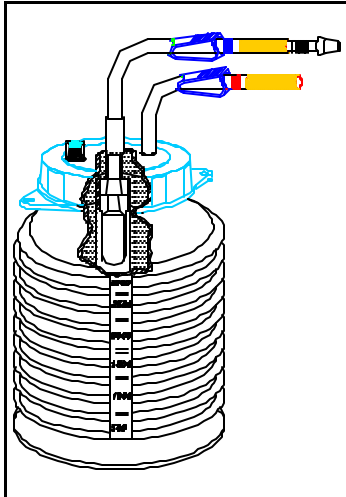


MULTIZAMM AR

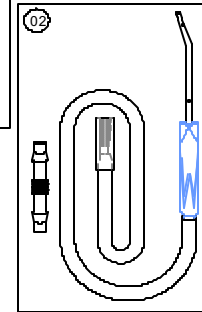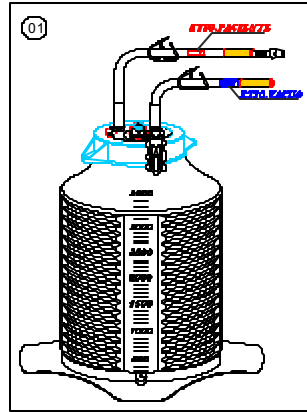


MULTIZAMM SAE

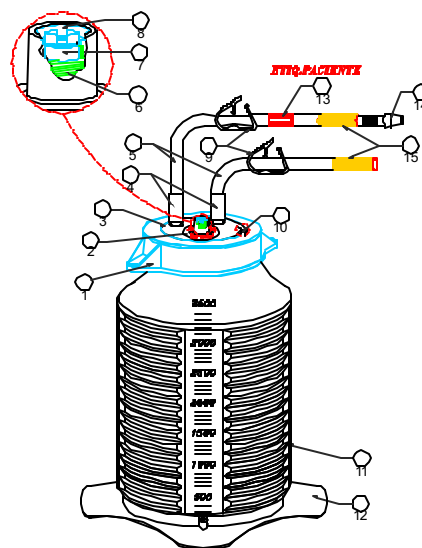

MULTIZAMM

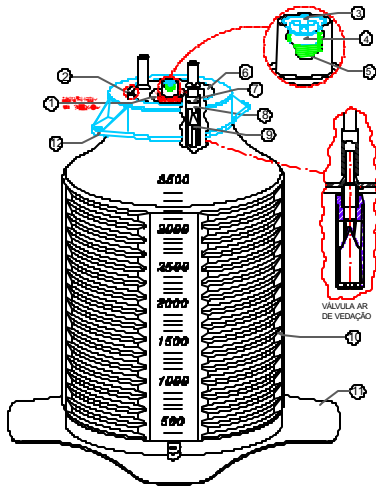

MULTIZAMM AR FRASCO

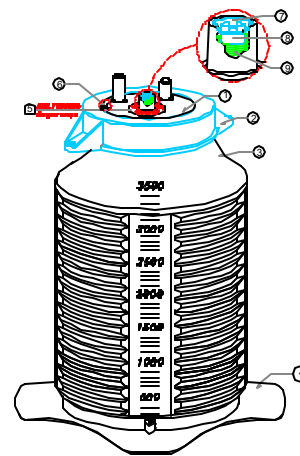

MULTIZAMM FRASCO

3. PRECAUÇÕES:

- 3.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão asseguradas dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas o produto não deve ser utilizado. Comunique imediatamente ao fabricante, para que providências sejam tomadas.
- 3.2. É recomendável manter um frasco sobressalente próximo caso necessite uma troca rápida.
- 3.3. A válvula de segurança de aspiração atua entre os limites: inferior 37 cm Hg e superior 43cm Hg.
- 3.4. Deve ser verificado o posicionamento da válvula anti-refluxo (AR), para certificar se a mesma encontra-se na parte inferior da "gaiola".
- 3.5. Deve ser feita uma avaliação do produto antes do uso:
 - 3.5.1. Verifique se a tampa está corretamente fechada.
 - 3.5.2. Clampeie a linha de aspiração e abra o vácuo para verificar se a válvula de segurança está funcionando normalmente.
 - 3.5.3. A válvula anti-refluxo tem o objetivo de bloquear a aspiração automaticamente quando o nível máximo é atingido
- 3.6. Em qualquer situação irregular, como a falta de pressão ou danificação do frasco, não utilize o produto.
- 3.7. Troque o frasco sempre que necessário.
- 3.8. Descarte o produto após o uso. Não reutilize ou reesterilize. Lembre-se: Produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
- 3.9. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa.
- 3.10. A Zammi Instrumental Ltda não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

4. INSTRUÇÕES DE USO:

- 4.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 4.2. Certifique-se de que a válvula de controle de aspiração está funcionando, exercendo uma leve pressão com o dedo indicador. O êmbolo deve estar se movendo livremente. (O objetivo da válvula é impedir que um excesso na pressão danifique o frasco e altere a aspiração).
- 4.3. Não obstrua a entrada da válvula.
- 4.4. Coloque o frasco no suporte adequado ou no piso, próximo à mesa, de acordo com o comprimento da extensão do aspirador.
- 4.5. Conecte a linha de vácuo ao conector da via de vácuo.
- 4.6. Conecte o aspirador na via identificada como paciente.

5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

- 5.1. Evite calor excessivo.
- 5.2. Proteja da luz e umidade.

6. ACONDICIONAMENTO:

Produto acondicionado em filme de polietileno/poliéster e papel grau cirúrgico e posteriormente em caixa de papelão (caixa de remessa).
O Multizamm SAE é fornecido juntamente com 01 aspirador cirúrgico.
Cada embalagem contém 01 unidade do produto.

ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.

Rua Bernardo Vasconcelos, 992 - Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ

Telefone: (0xx21) 2677-1500

CNPJ:30.450.803/0001/09 - Nº ANVISA 102.163-50069

e-mail: zammi@zammi.com.br

Resp. Técnico: Engº Junqueira Pereira, J.R. – CRQ 02300/280

“Esterilizado em óxido de etileno”

“PRODUTO DE USO ÚNICO – DESTRUIR APÓS O USO”

Contato SAC para solicitação de impressos, sem custo adicional: (21) 2677-1534